
MODE D'EMPLOI
HANDLEIDING

Français
Nederlands

SANGLE DE BASSIN BEKKENGORDEL

Beckengurt_FR-NL

04-21

REF

Article / Artikel

22264



DESCRIPTION

Sangle de bassin

Conçue pour toutes les personnes susceptibles de glisser ou de basculer du siège pendant le trajet ou lors des manœuvres de freinage.

Indications

Elle est destinée aux utilisateurs ayant besoin d'une assistance pour maintenir une position droite sur le tricycle. Cela peut-être dû, par exemple, à une incapacité à s'asseoir sans assistance.

Contre-indication

La sangle de bassin ne convient pas aux applications qui sont contraires à l'usage conforme car cela pourrait présenter des risques. Par exemple, elle ne doit pas être utilisée comme ceinture de sécurité à bord d'une automobile ou par des personnes non familiarisées avec son fonctionnement. La sangle doit être ajustée à l'utilisateur, elle ne convient pas aux personnes dont le dos ne peut pas se maintenir seul.

Veuillez observer les contre-indications dans le mode d'emploi des vélos couchés.

Protection contre les influences de l'environnement

Du fait des matériaux employés, la sangle de bassin est protégée contre la corrosion. Elle se compose de tissu et de matières synthétiques.

Nettoyage et désinfection

La sangle de bassin peut être nettoyée et désinfectée à l'aide de produits de nettoyage et de désinfection ménagers usuels.

Normes et directives observées

La sangle de bassin est considérée comme un accessoire au sens du règlement 2017/745 sur les produits médicaux. À ce titre, elle porte la marque CE.

Durée d'utilisation

En cas d'utilisation conforme, de respect du mode d'emploi, et en fonction de la fréquence d'utilisation, la durée d'utilisation attendue peut être de 8 ans.

Réutilisation

Dans des conditions d'usage conformes à sa destination, cet accessoire est apte à la réutilisation, après contrôle par atelier spécialisé.

Instructions relatives à l'élimination

En fin de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais éliminé dans les règles de l'art, en conformité avec la réglementation s'appliquant localement à l'élimination des déchets.

BESCHRIJVING

De bekkengordel

Ontworpen voor alle personen bij wie het gevaar bestaat dat zij tijdens het fietsen of bij het remmen van de zitting glijden of vallen.

Indicatie

Gebruikers hebben ondersteuning nodig bij de positionering in de trike. De oorzaak kan bijvoorbeeld een beperking bij het zelfstandig zitten zijn.

Contra-indicatie

De bekkengordel is niet geschikt voor toepassingen die van het gebruik volgens de voorschriften afwijken en gevaren kunnen veroorzaken. Daartoe behoort onder andere het gebruik als veiligheidsgordel in de auto of de bediening door niet-geïnstreunde personen. De gordel moet voor de gebruiker passend worden ingesteld en is niet geschikt voor personen die hun romp niet zelfstandig rechtop kunnen houden.

Neem de contra-indicaties in de gebruiksaanwijzingen van de ligfietsen in acht.

Bescherming tegen weersinvloeden

De bekkengordel bestaat uit corrosiebestendige materialen. Er worden kunststoffen en textiel gebruikt.

Reiniging en desinfectie

De bekkengordel kan worden gereinigd en ontsmet met gewone huishoudelijke schoonmaak- of desinfectiemiddelen.

Geldende normen en voorschriften

Dit is een accessoire in de zin van de verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen, die een overeenkomstige CE-markering heeft.

Gebruiksduur

Bij correct gebruik volgens de gebruiksaanwijzing en afhankelijk van de gebruiksfrequentie, is de gebruiksduur max. 8 jaar.

Hergebruik

Mits volgens de voorschriften gebruikt en na controle door een erkende dealer is dit accessoire geschikt voor hergebruik.

Instructies voor verwijdering




Na afloop van de gebruiksduur mag het product niet met het huisvuil worden weggegooid, maar moet deskundig worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwerking.

MONTAGE

1. Placez la sangle de bassin **(01)** autour du châssis de siège **(02)** et fixez-la en utilisant les boucles en plastique **(03)**.
2. La sangle peut être desserrée ou resserrée en ajustant la longueur des extrémités **(04)** à l'aide des boucles en plastique.
3. La sangle de bassin s'ouvre et se ferme rapidement grâce à la fermeture rapide **(05)**.

MONTAGE

1. Plaats de bekkengordel **(01)** rond de zitting **(02)** en bevestig deze met de gespen van kunststof **(03)**.
2. Door losmaken of strakker trekken van de uiteinden van de bekkengordel **(04)** in de gespen van kunststof kan de bekkengordel worden losgemaakt of strakker worden gemaakt.
3. Met de snelsluiting **(05)** kan de bekkengordel snel worden geopend en gesloten.

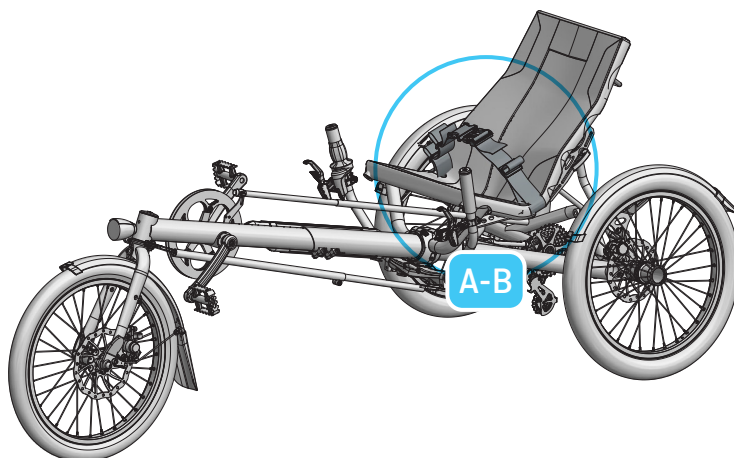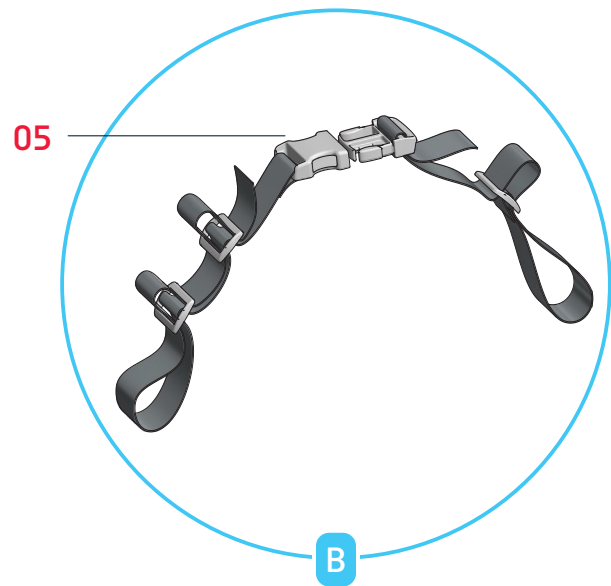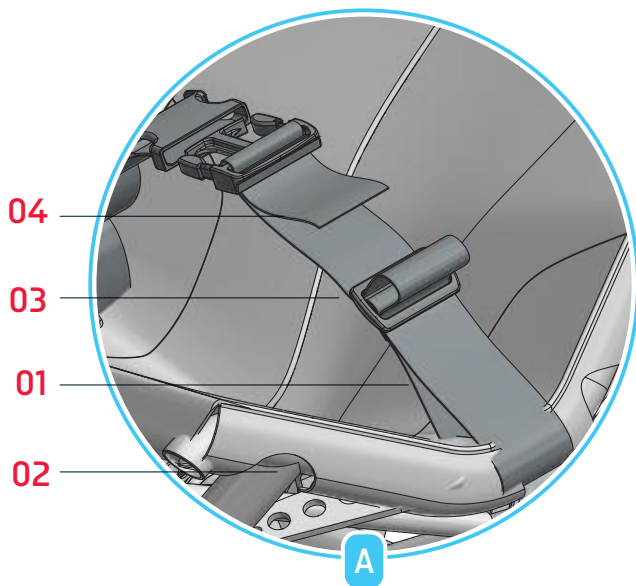

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

La sangle de bassin est exclusivement destinée au maintien correct de personnes en position assise sur le tricycle et ne doit pas être utilisée comme ceinture de sécurité à bord d'une automobile. Des ceintures défectueuses ou endommagées ne doivent pas être utilisées. Elles doivent être remplacées sans tarder.

Instructions relatives aux incidents

Tous les incidents graves* dont la survenue est liée au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

* « Incident grave » : incident qui a eu, aurait pu avoir ou peut avoir, directement ou indirectement, l'une des conséquences suivantes : a) le décès d'un patient, d'un usager ou d'une autre personne ; b) la dégradation grave temporaire ou permanente de l'état de santé d'un patient, d'un usager ou d'une autre personne ; c) un risque grave pour la santé publique.

Risques résiduels

Aucun connu

Contact en cas de problèmes

Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions relatives à votre vélo thérapeutique, veuillez contacter votre revendeur ou la société HASE BIKES pour obtenir de l'aide.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De bekkengordel dient uitsluitend voor de correcte positionering van personen in de trike en mag bijv. niet als veiligheids gordel in de auto worden gebruikt. Defecte of beschadigde gordels mogen niet worden gebruikt en moeten onmiddellijk worden vervangen.

Aanwijzing over incidenten

Alle in samenhang met het product opgetreden ernstige incidenten* dienen te worden aangemeld bij de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten van het land waarin de gebruiker en/of de patiënt woont.

* Een "ernstig incident" is een incident dat direct of indirect een van de volgende gebeurtenissen had, had kunnen hebben, of zou kunnen hebben: a) de dood van een patiënt, gebruiker of een andere persoon, b) de tijdelijke of langdurige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere personen, c) een ernstig gevaar voor de volksgezondheid.

Restrisico's

Geen bekend

Contact bij problemen

Als u problemen heeft met de aangepaste fiets, of iets wilt vragen, neem dan gerust contact op met uw erkende dealer of HASE BIKES. Wij helpen u graag.

