

La barre de poussée a été conçue pour être utilisée sur tous les tricycles Hasebikes (sauf pour les Trets). Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation sur d'autres véhicules.



Montage

1. Détachez le velcro supérieur de la housse de siège. Retirez les bouchons d'extrémité des extrémités des tubes.
2. Introduisez les douilles d'adaptation (1) avec respectivement deux papiers spéciaux (2) dans les tubes du dossier de siège comme illustré. Tournez la fente vers l'arrière.
3. Insérez les potences (3) dans les douilles d'adaptation.
4. Ajustez la barre de poussée à la hauteur souhaitée. Serrez les vis de serrage du cône à 26 Nm.
5. Tournez la barre transversale de manière à ce que les poignées ergonomiques se trouvent dans la position souhaitée. Serrez les vis M6 en croix à 9 Nm.



Attention!

Veillez à ne serrer la potence qu'au niveau des douilles d'adaptation.

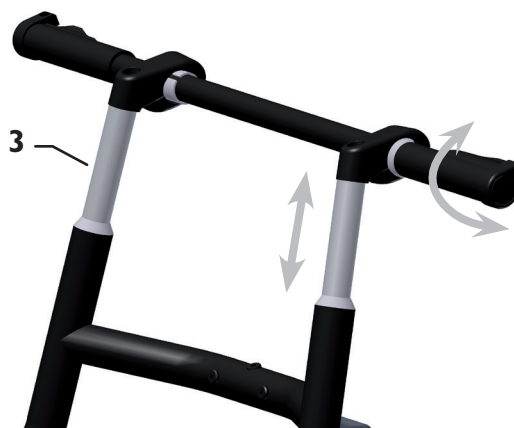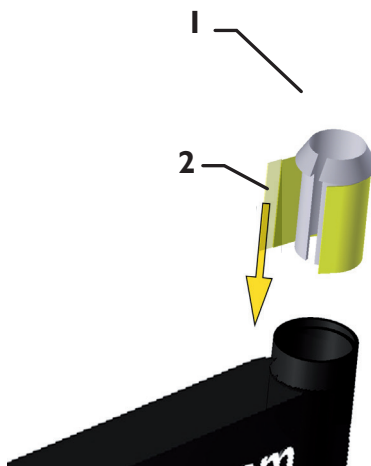

Nummer	Beschreibung	Art.-Nr.	Menge
1	Potence, acier inoxydable	22957	2
2	Barre transversale	20203	1
3	Douille d'adaptateur 22,5/25,6 mm	23049	4
4	Poignée ergonomique, la paire	25063	1
5	Papier spécial Synflex 0,45mm,	20146	4

De duwstang is speciaal ontwikkeld voor gebruik met Hasebikes trikes (behalve TRETs). Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebruik met andere voertuigen.

Installatie

1. Maak het bovenste klittenband van de stoelbekleding los. Verwijder de afsluitdoppen van de buisuiteinden.
2. Duw de adapterhulzen (1) in combinatie met telkens twee stukjes tape (2) in het uiteinde van de buizen aan de achterkant van de stoel. Draai de adapter tot de opening naar achteren wijst.
3. Schuif de stelen (3) in de adapterhulzen.
4. Stel de glijstang in op de gewenste hoogte. Draai de bouten van de conische klem vast met 26 Nm.
5. Draai de dwarsbalk zodat de ergogrepen in de gewenste positie staan. Draai de M6-bouten om en om vast met 9 Nm.



Attentie!

Zorg ervoor dat u de stuurpen alleen vastklemt in het gebied van de adapterhulzen.

Number	Description	Art.No.	Quantity
1	Steel, roestvrij staal	22957	2
2	Crosstube	20203	1
3	Adapterhuls 22,5/25,6 mm	23049	4
4	Ergo grip, pair	25063	1
5	Tape Synflex 0,45mm, l=50mm	20146	4



HASE BIKES
Hiberniastraße 2
45731 Waltrop
Germany

Phone +49 (0) 23 09 / 93 77-0
Fax +49 (0) 23 09 / 93 77-201
info@hasebikes.com
www.hasebikes.com